

It's Sound

MobiFren Healing Fit (MFB-HC7700)

Manual



---

MobiFren은 사용자 모두가 행복해 하는 모습을 꿈꾸며 만들었습니다.

---

MobiFren만의 독자적인 MSTSTM 튜닝기술로 차별화 된 고품질의

Hi-Fi Stereo 음질을 제공합니다.




MSTSTM is a Sound Tuning Technology of MobiFren Co.,Ltd


# 목차

구성품 .....	1
기기 켜기 / 끄기.....	2
기기 충전하기 .....	2
각 부분 명칭과 역할 .....	3
사용하기 전에 .....	4
용어 정리 .....	4
사용 방법 .....	5-8
테라피(TES+사운드) 사용하기 .....	5-6
Bluetooth 로 기기 연결하기.....	7
Bluetooth 로 기기 사용하기.....	7
MP3 플레이어로 사용하기.....	7
버튼 조작법 .....	8
충전하기 및 LED 표시 .....	8
TES 관련 FAQ.....	9-10
취급 주의.....	10
인증 및 안전 승인 .....	11
제품 규격 및 특성.....	12
제품 보증서.....	13

# 구성품

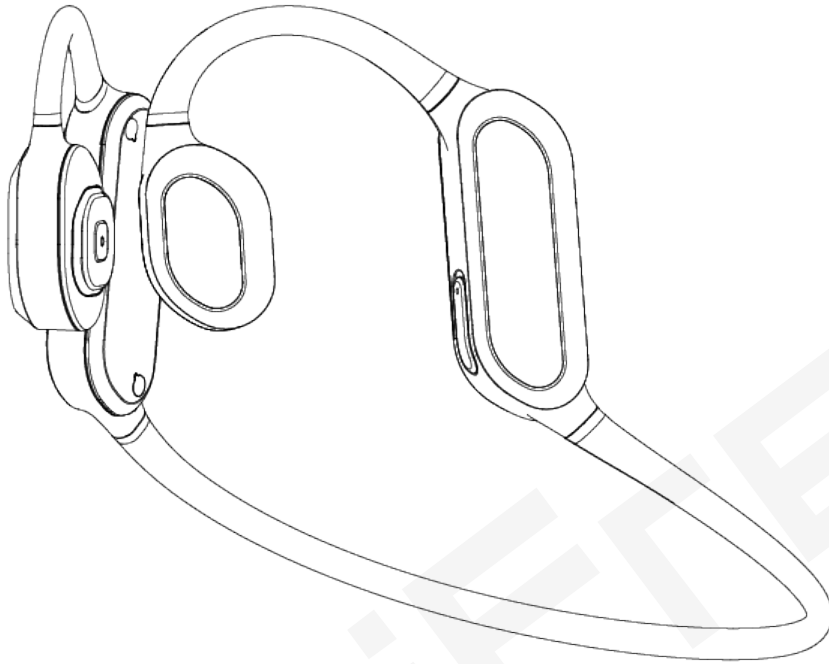


힐링핏 본체

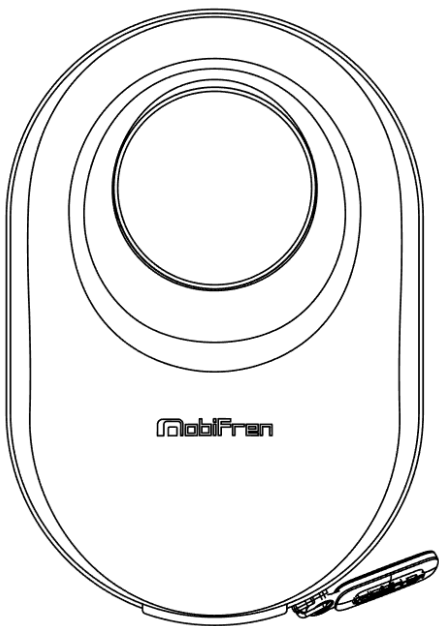

가죽 파우치




사용설명서

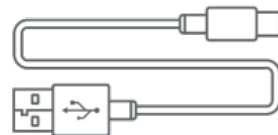

충전케이블(C-Type)


※ 표시된 그림은 제품의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

## 기기 켜기 / 끄기

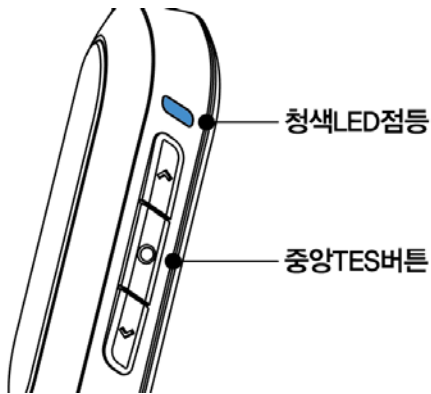

< 기기 켜기 >


꺼진 상태에서 왼쪽 본체 후면의 중앙TES버튼을 3초동안 누르면 “전원을 켭니다” 라는 음성과 청색 LED가 켜지며 제품이 켜집니다.

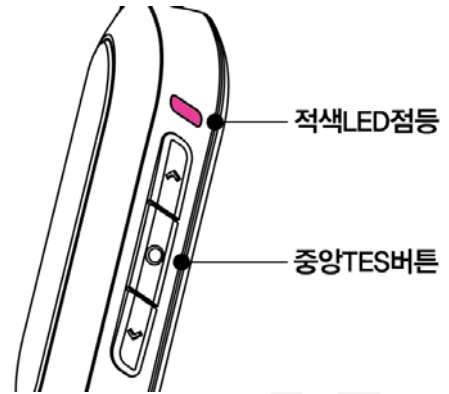

< 기기 끄기 >


켜진상태에서 왼쪽 본체 후면의 중앙TES버튼을 3초동안 누르면 “전원을 끕니다” 라는 음성과 적색 LED가 켜지며 제품이 꺼집니다.

## 기기 충전하기

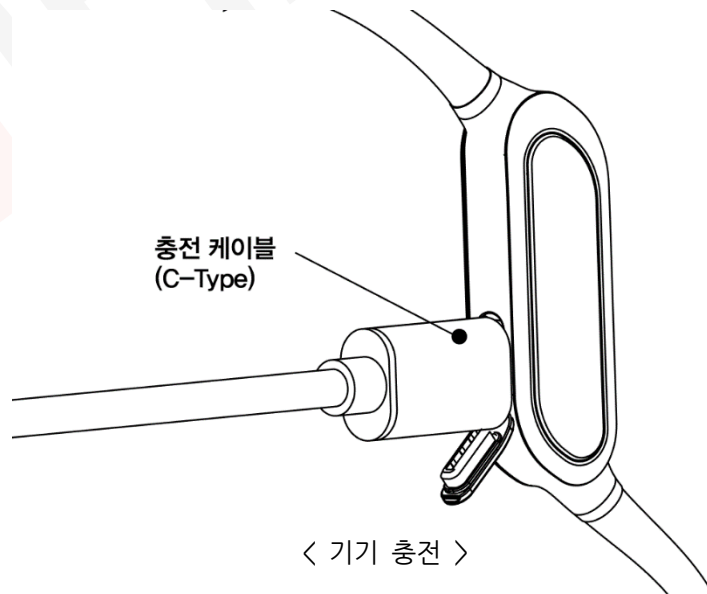

- 동봉된 C-Type 케이블로 힐링핏 충전이 가능합니다.
- 버튼이 있는 왼쪽 기기 본체에 실리콘 커버를 빼고 케이블을 연결하여 충전이 가능하며, 충전시에 5V1A 충전기를 권장합니다.

## 각 부분 명칭과 역할

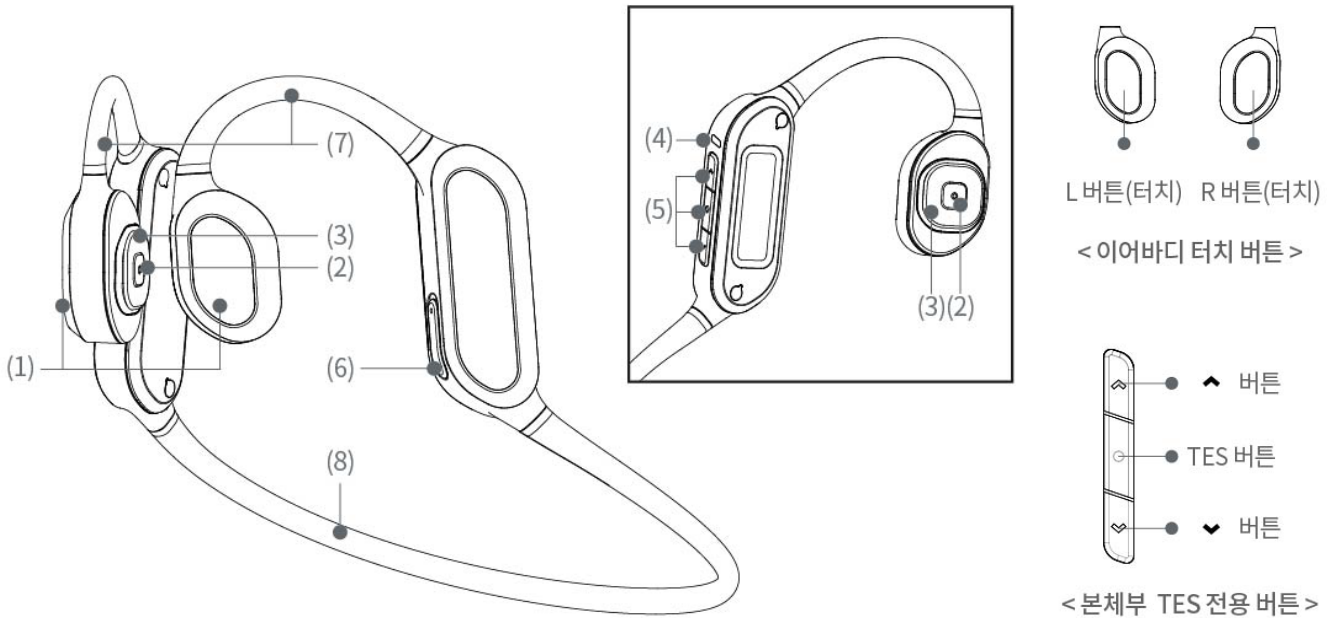

(1) 터치버튼 L, R	볼륨, 다음곡등 제품 조작하는 정전식 터치버튼
(2) 전극판	TES 미세전류가 인체로 전달
(3) 유닛 실리콘	골전도 유닛의 사운드가 전달
(4) LED	제품의 상태를 확인
(5) TES 전용버튼	TES 기능을 조작
(6) 충전단자 커버	C-Type 충전단자 커버
(7) 이어밴드	형상기억합금이 내장된 플렉서블한 밴드 (귀)
(8) 메인밴드	형상기억합금이 내장된 플렉서블한 밴드 (목)

## 사용하기 전에

- 처음 사용 시 C-Type 충전 케이블로 기기를 최소한 10분 이상 충전하십시오.
- 새 장치와 연결 시 힐링핏과 다른 장치와 연결되지 않은 것을 확인하십시오
- 힐링핏에 페어링했던 다른 장치가 있으면 기존장치와 연결이 되어, 새 장치와는 페어링이 불가능합니다.
- 무선으로 사용하다 배터리 경고음이 뜨면 충전 케이블을 꽂아 충전 후 사용하기 바랍니다.
- MobiFren Healing Fit은 TES(미세 전기 자극) 테라피 기능, 사운드 테라피 기능, Bluetooth 기능, MP3 Player 기능, 총 4가지로 구성되어 있습니다.

※ TES 테라피 사용 시에는 피부에 땀이나 물기를 제거한 건조한 상태에서 사용해주세요

※ PC가 아닌 충전기 사용 시에는 정격전압 5V/1A의 승인된 충전기를 사용해주세요

※ 본 기기는 의료기기가 아닙니다.

## 용어정리

- 테라피 모드 : 3가지 모드의 사운드 테라피(힐링/학습/수면)와 TES(미세 전기 자극)가 동시에 동작하는 모드
- Bluetooth 모드 : 휴대폰과 블루투스로 연결되어 전화 통화 및 음악 감상이 가능한 상태
- MP3 모드 : MP3 파일을 제품의 내장 메모리에 직접 넣어 휴대폰 없이 음악 감상이 가능한 상태.

※ 내장 메모리가 있어, 휴대폰 없이 단독으로 듣고 싶은 음악을 저장할 수 있습니다.

※ 실수로 기본 폴더(Healing/Study/Sleep)의 사운드 테라피 음원이 삭제된 경우에는, 힐링핏(<https://healingfit.info>) 페이지에서 다운로드 할 수 있습니다

## 사용 방법

※ 제품 착용 시 위의 착용 이미지를 참고하여 본인에게 맞는 위치에 착용해 주세요.



MobiFren Healing Fit은 사용방법이 간단하여 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.



힐링핏 제품 소개 영상 보러 가기



힐링핏 사용 방법 영상 보러 가기

테라피(TES+사운드) 사용하기

**TES 기술과 사운드 테라피가 접목된 힐링핏으로 소중한 일상의 휴식을 온전히 경험하세요**

(TES 기능은 하루 30분 정도 꾸준히 사용하시면 도움이 됩니다.)

● 테라피 동작 시작/종료



- TES 버튼을 짧게 한번 누르면 시작하고, 동작하는 상태에서 TES 버튼을 짧게 한번 누르면 종료함
- 대기 상태에서 TES 버튼을 누르면, 미세 전기 자극과 함께 힐링/학습/수면 모드의 음악이 재생됨

● 사운드 테라피 음악 변경하기



(힐링, 학습, 수면음악은 각 5곡, 총 15곡 기본 탑재되어 있음)

- 사운드 테라피 재생 중 R버튼을 2초 정도 터치하여 삐- 음을 들은 후 손을 떼면 다음 힐링음악이 재생 됩니다. (L버튼 누르면 이전곡 재생)

● 사운드 테라피 모드 변경하기




- 사운드 테라피 재생 중 R버튼(또는 L버튼)을 4초정도 터치하여 삐- 삐- 음을 듣고 손을 떼면, 힐링→학습→수면→힐링 모드로 순환되면서 변경됨. (L버튼 누르면, 반대로 순환)

- \* 힐링모드 : 미세전기자극과 함께 힐링 음악이 재생되며, 신체를 최대한 릴렉스한 상태로 유지합니다.
- \* 학습모드 : 미세전기자극과 함께 학습 음악이 재생되며, 학습에 도움이 되는 신체 컨디션을 유지하도록 도와줍니다.
- \* 수면모드 : 미세전기자극과 함께 수면 음악이 재생되며, 수면 테라피 사용 후 잠자리에 들면 숙면에 도움이 됩니다.

※ 수면모드는 잠자리에 들기 전 사용하시기 바랍니다. ( 사용 후 힐링핏을 벗어두고 취침하시기 바랍니다. )

● 휴대폰 음악 재생 중 TES신호 발생시키기 

- 블루투스로 연결 후 음악이 재생되고 있는 상태에서 ▲ 버튼을 짧게 누르면 테라피 시작 안내와 함께 TES 신호 발생.
- TES 동작 중 TES버튼을 다시 누르거나 음악이 정지되면 테라피 정지 음성 안내와 함께 TES신호 발생 정지.


● Healing(힐링), Study(학습), Sleep(슬립) 폴더에 본인 선호 음악 추가하기 

- 각 Healing(힐링), Study(학습), Sleep(슬립) 폴더에 본인 선호 음악을 넣어 사용가능 합니다.

※ 본인의 선호음악을 넣어 사용 할 시, 기본 폴더(Healing/Study/Sleep)명을 변경하면 안됩니다.

※ 수면모드에서는 테라피 종료 10분 전부터 점차 볼륨이 감소하다 테라피가 종료됩니다.

※ 충전중에는 TES테라피 사용을 삼가해주시기 바랍니다.

● 미세전기자극(TES) 세기 조절하기(테라피 동작 중에만 가능, 1단계~10단계) 


- : TES 동작 중에 ▲ 버튼을 1초 정도 길게 누르면 1단계 증가
- : TES 동작 중에 ▼ 버튼을 1초 정도 길게 누르면 1단계 감소

※ TES 동작 중에 ▲버튼 또는 ▼버튼을 계속 누르고 있으면 한 단계씩 증가 또는 감소합니다.

※ 낮은 단계부터 시작해서 천천히 증가시키면서 사용하는 것을 권장합니다.

※ 약간의 전기 자극을 느끼는 단계 또는 자극을 느끼는 단계보다 한 단계 낮추어 사용하는 것을 권장합니다.

※ 테라피 사용 중에 미세 전기 자극이 강하게 느껴지면, ▼를 길게 눌러 미세 전기 자극 세기 단계를 낮추어 사용해 주세요. (자극 세기 단계를 변경하지 않았는데도 사용 중 미세 전기 자극이 강하게 느껴지는 이유는 골드핀과 접촉되는 피부 상태의 미세변화로 인한 것입니다.)

● 미세전기자극(TES) 동작시간 변경(기본 30분, 5분~50분 사이를 5분 단위로 설정 가능) 

- : TES 동작 중에 ▲ 버튼을 짧게 한번 누르면 5분 증가
- : TES 동작 중에 ▼ 버튼을 짧게 한번 누르면 5분 감소

※ 테라피 동작시간은 30분이 기본으로 설정되어 있고 테라피 동작 후 ▲ 버튼이나 ▼ 버튼을 짧게 누르면 경과된 시간에서 5분 단위로 시간을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 설정된 시간이 경과하면 테라피가 자동 정지 됩니다.

※ 사용 중 수시로 부드러운 천으로 골드핀을 닦아주시면 더욱 효과가 좋습니다.

※ 테라피 사용시에 골드핀이 한곳에만 계속 접촉하는 관계로 피부 트러블이 발생할 가능성이 있으니, 이 경우에는 완전히 회복 후 사용해 주세요.



## Bluetooth로 기기 연결하기



다음 절차에 따라 본 기기를 핸드폰이나 다른 장치에 연결하십시오.

### ① 페어링 및 기기 연결

- 전원 Off 상태에서 TES 버튼을 길게 누릅니다. 2초 정도 지났을 때 "전원을 켭니다"라는 음성이 들리고, 4초 정도 지나면 "휴대폰에서 검색해서 연결하세요" 라는 음성이 들리면 버튼에서 손을 땁니다.  
(페어링 모드 진입된 상태)
- 연결하려는 기기(휴대폰)의 블루투스 설정화면에서 "Mobifren Healing Fit"을 검색하여 기기 연결하면 "기기 연결되었습니다" 라는 음성과 함께 기기가 연결됩니다.

### ② 연결 후 사용

- 한번 연결이 된 이후에는, TES 버튼을 2초 정도 눌러 전원을 켜면 기기에 자동으로 연결됩니다.

※ 만일 다른 기기에 연결하고자 할 때는 4초 동안 눌러서 페어링 모드로 진입해서 연결하세요

## Bluetooth로 기기 사용하기

블루투스로 기기를 연결한 후 무선으로 음악감상 및 통화기능을 사용 할 수 있습니다.

### ① 음악 재생

- 이어바디의 터치 버튼을 빠르게 두 번 터치하여 음악재생 및 정지 기능을 사용 할 수 있습니다.
- 이어바디의 터치 버튼을 한 번씩 터치하여 볼륨조절을 할 수 있습니다.  
(왼쪽 : 볼륨 다운, 오른쪽 : 볼륨 업)

### ② 전화 받기

- 전화 수신 시 터치 버튼을 빠르게 두 번 터치하여 전화 수신이 가능합니다.
- 전화 수신 시 터치버튼을 2초 동안 터치하면 전화 거절이 가능합니다
- 통화 중 터치버튼을 빠르게 두 번 터치하여 전화 종료가 가능합니다.

※ 통화 시 통화 품질을 위해 오른쪽 이어바디에서만 통화음이 들립니다.

### ③ 빅스비 시리 등 음성비서 호출

- 터치버튼을 3번 빠르게 터치 시 휴대폰의 음성비서(시리, 구글 어시스턴트)를 호출합니다.

## MP3 플레이어로 사용하기

본인 취향의 MP3음악(mp3, wav 파일)을 내장 메모리에 저장하여 조깅과 같은 운동을 할 때 무거운 휴대폰을 가지고 가지 않더라도 음악을 즐길 수 있습니다

### ① 음악 저장하기



- USB 케이블을 이용하여 힐링핏과 컴퓨터를 연결하면 원하는 음악을 내장된 메모리에 저장할 수 있습니다.
- 음악 저장 시 사용자가 폴더를 만들거나, 최상위 폴더에 음악을 저장해 MP3 플레이어 모드로 사용 할 수 있습니다.

※ 기본 폴더 명(HEALING/STUDY/SLEEP)은 시스템 폴더명으로 변경하면 안됩니다.

### ② 음악 듣기




- 휴대폰과 블루투스 연결을 해제한 상태에서 R or L 버튼을 빠르게 2번 터치하면 재생됩니다.

※ 기본 폴더 외에 사용자가 저장한 음악은 무작위로 재생됩니다.


※ 휴대폰과 블루투스 연결된 상태에서는 휴대폰의 음악이 재생됩니다.

버튼 조작법

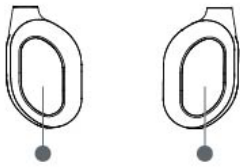

L 버튼(터치) R 버튼(터치)

<이어바디 터치 버튼>

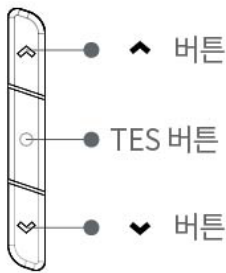

<본체부 TES 전용 버튼>

전원 및 연결	
전원 On	(꺼진상태에서) TES 버튼 2초간 누름
전원 Off	(켜진상태에서) TES 버튼 4초간 누름
페어링 모드	(꺼진상태에서) TES 버튼 4초간 누름
전화	
통화수신	(수신중) L or R 버튼 빠르게 2번 터치
통화종료	(통화중) L or R 버튼 빠르게 2번 터치
통화거절	(수신중) L or R 버튼 2초동안 터치
음악 재생(휴대폰 음악 & 힐링핏 내장 음악)	
노래재생	L or R 버튼 빠르게 2번 터치
일시정지	L or R 버튼 빠르게 2번 터치
볼륨Up	R 버튼 짧게 1번 터치(1초 간격으로)
볼륨Down	L 버튼 짧게 1번 터치(1초 간격으로)
다음곡 재생	R 버튼 길게(2초정도) 터치
이전곡 재생	L 버튼 길게(2초정도) 터치
다음폴더 곡 재생	R 버튼 길게(4초정도) 터치
이전폴더 곡 재생	L 버튼 길게(4초정도) 터치
TES 기능	
TES On	TES 버튼 짧게 누름
TES Off	(TES On 상태) TES 버튼 짧게 누름
TES 시간 Up	(TES On 상태) ▲ 버튼 짧게 누름
TES 시간 Down	(TES On 상태) ▼ 버튼 짧게 누름
TES 세기 Up	(TES On 상태) ▲ 버튼 길게(1초 정도) 누름
TES 세기 Down	(TES On 상태) ▼ 버튼 길게(1초 정도) 누름
모드변경	(TES On 상태) R or L버튼 길게(4초 정도) 터치
다음곡 재생	(TES On 상태) R 버튼 길게(2초정도) 터치
이전곡 재생	(TES On 상태) L 버튼 길게(2초정도) 터치
휴대폰 or mp3음악+TES신호	음악재생 중 ▲ 버튼 짧게 누름
음성제어	
빅스비 시리 등 음성비서 호출	(대기상태에서) L or R 버튼 빠르게 3번 터치

충전하기 및 LED 표시

본체부 Jack Cover를 열고 USB-C 충전 포트에 충전 케이블을 연결해 충전해 주십시오.

LED 표시	
충전 중	적색 LED 점등
완충	청색 LED 점등
전원On	청색 LED 1초 동안 점등
전원Off	청색, 적색 LED 동시에 1초 동안 점등
페어링 성공, 연결완료	청색 LED 5회 깜빡인 후 소등
페어링 모드	청색 LED 점등 유지
배터리 부족	적색 LED 5초간격으로 짧게 깜빡임
TES동작, Play	동작 후 30초 동안만 청색 LED 5초 간격으로 짧게 깜빡임

※ 주요 LED 이벤트만 표기하였습니다.

## TES 관련 FAQ

Q. 하루에 얼마나 사용하는 것이 좋은가요?

A. 1회 최대 사용 시간이 50분입니다. (기본 30분) 하루 1~3회를 권장합니다.

Q. 장시간 사용시 혹시 부작용은 없나요?

A. 많은 연구자료에서 2mA이하의 미세전기자극은 부작용이 없다고 나와 있습니다. 저희 제품은 0.2~1mA의 미세전류가 흐르기 때문에 안심하고 사용하셔도 됩니다.

Q. TES(미세전기자극) 세기단계는 어떻게 조절하여 사용하는 게 좋은지요?

A. 테라피 시작 후 초기 몇 분간은 자극세기를 잘 느끼지 못 할 수가 있습니다. 1단계부터 4단계까지는 서서히 자극세기를 증가해 주시고, 4단계 음성 안내가 나오면 3분정도 기다려 주세요. 3분이 경과해도 자극을 못 느끼면 자극세기를 한 단계씩 서서히 올려 주시고, 자극 세기가 강하게 느껴지면 단계를 낮추어 사용해 주세요. 처음 사용시 단계를 올려도 자극 느낌이 없어서 10단계까지 올린 상태로 사용하다 보면 시간이 좀 지나면 자극이 너무 세게 느껴질 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

Q. 어느 정도의 세기가 사용하기에 적당 한가요?

A. 같은 세기라도 개인마다 느끼는 정도가 다르기 때문에 일괄적으로 말할 수는 없습니다. 자극의 세기를 느낄 때를 기준으로 한 단계 낮추어 사용하는 것을 권장합니다. 전기자극이 부담스럽지 않으시다면 자극을 느낀 상태로 사용해도 무방합니다. 전기자극을 못 느끼더라도 TES테라피 효과는 있습니다. 어떤 느낌이든 개인이 편안하게 생각할 수 있는 세기로 사용하시면 됩니다.

Q. 5단계로 설정하고 약간의 자극이 있는 느낌으로 편안하게 사용하고 있는데, 단계를 변경하지도 않았는데 갑자기 자극이 세게 느껴집니다. 이게 정상입니까?

A. 네 정상입니다. 동일한 위치에 지속적으로 자극이 발생하다 보면, 접촉부의 피부 상태, 자극 효과 등으로 인해 피부와의 접촉저항이 변경되어 자극의 세기가 달라질 수 있습니다. 이 때는 미세전기 자극부를 살짝 옆으로 옮기시거나 세기를 한 단계 낮게 변경하여 사용하시면 됩니다.

Q. 평소에는 7단계에서 적당한 세기로 잘 사용했는데, 오늘은 갑자기 3단계에서도 세기가 느껴지네요. 단계의 세기 조절이 고장 난 것 아닐까요?

A. 아닙니다. 동일한 TES신호가 발생함에도 불구하고 신체의 상태, 피부와 접촉상태 등에 따라 매번 개인이 느끼는 자극의 세기는 달라질 수 있습니다. 사용하실 때마다 적절한 세기를 조절하여 사용하시기를 권장합니다.

Q. 휴대폰 음악이나 유튜브를 음악을 들으면서 TES를 작동 할 수 있나요?

A. 휴대폰 음악이나 유튜브를 보고 있는 상태에서 **▶** 버튼을 짧게 누르면 TES가 동작합니다.

Q. 사운드 테라피는 각 모드별로 5곡이 있는 것으로 알고 있는데 사용할 때마다 매번 똑같은 음악만 들려요. 다른 곡을 들으려면 어떻게 해야 하나요?

A. 음악을 듣고 있는 상태에서 R 또는 L 버튼을 2초 정도 길게 누르면 삐 소리와 함께 다음 곡 혹은 이전 곡을 들을 수 있습니다. 힐링/학습/수면 등 사운드 테라피 음원 재생은 특별히 사용자가 변경하지 않는 이상 1곡이 반복해서 재생 되도록 되어 있습니다.

Q. 미세전기 자극부는 별도 관리가 필요 없나요?

A. 사용 중 피부의 분비물이 점착될 수 있으니 수시로 부드러운 천으로 닦아주세요. 그리고 테라피 사용시에 미세전기 자극부가 한곳에만 계속 접촉하는 관계로 피부 트러블이 발생할 가능성이 있습니다. 이 경우에는 완전히 회복 후 사용해 주세요.

Q. 잠자리에 누워 테라피 동작 중에 터치를 하지 않았는데도 이상동작(볼륨 업 다운, 다음 곡 재생, 모드전환 등)을 합니다.

A. 터치버튼은 인체의 정전기를 이용하는 방법이기 때문에 움직일 때, 머리카락이나 매트 등의 정전기 성분이 터치 버튼 쪽으로 입력이 되는 경우 이상동작을 하게 됩니다.

Q : 음악을 들을 때는 양쪽이어폰에서 음악이 들리는데, 통화시에는 우측 이어폰에서만 상대방 목소리가 들립니다. 불량이 아닌가요?

A : 통화시 우측 이어폰에서만 상대방 목소리가 들리는 것은 정상입니다. 좌측 이어폰에 마이크와 스피커가 가까이 위치해 있어서 스피커로 나온 상대방 음성이 마이크로 다시 들어가 상대방에게 자기의 음성이 들리는 문제를 해결하기 위해서 통화시에는 좌측 이어폰에서는 소리가 나지 않게 하였습니다.

## 취급 주의

# OFF

장시간 사용하지 않을 때는 항상 전원이 꺼진 상태로 안전한 곳에 보관하세요.



60°C 이상의 고온이나 직사광선 아래, 뜨거운 차량 등을 피해서 보관하세요. 고온에서 보관하면, 제품 오 동작 / 성능저하의 원인이 되고 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.



물 또는 기타 액체에 젖거나 잠기지 않도록 하세요. 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 보관 하세요.



어린이나 애완동물이 헤드셋을 물거나 빨지 않도록 하세요.



사용자 임의로 개조 / 분리 / 수리하지 마세요.

# 5V

승인된 충전기를 사용하세요. (정격 전압 : 5V)

## 인증 및 안전 승인

※ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

### RF 규격

사용 주파수	송수신대역 : 2402MHz ~ 2480MHz
전파 형식	F1D, G1D
통신 방식	반복신방식
사용 환경	-10°C ~ 50°C
사용 전원	DC 3.7 V (배터리)

### 방송 통신기기 인증표시

	특정소출력 무선기기
기자재의 명칭 (모델명)	무선데이터통신시스템용 무선기기 MFB-HC7700
인증 받은 자의 상호	(주)모비프렌
제조국가	중국
인증 번호	R-R-GTT-MFB-HC7700
제조 년 월	20 . . . .

## 제품 규격 및 특성

제품명	MFB-HC7700
연속 통화시간	약 7시간
연속 음악 재생시간	약 6시간
대기 시간	약 10 일
충전 시간	약 1.5시간
제품 크기	120(W) x 85(D) x 55(H)
배터리(용량)	내장형 리튬폴리머 ( 200mAh )
중량	31 g
무선 사용 거리	최대 10m 이내
지원되는 블루투스 프로파일	헤드셋 프로파일
	핸즈프리 프로파일
	스테레오 헤드셋 (A2DP) 프로파일
	리모컨 (AVRCP) 프로파일
블루투스 규격	버전 5.0 (BDR)

※ 사용시간은 연결되는 기기와 기기설정 상태(블루투스, 음원의 종류 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

# 제품 보증서

제품 보증기간은 구입일로부터 입니다. 자세한 사항은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

액세서리는 수리가 되지 않습니다. 액세서리는 보증 기간내 이상시 교체 서비스 되며, 제품 교환 사유에 포함되지 않습니다.

중요한 데이터는 안전한 곳에 백업하여 주시고 제품에 저장된 데이터 망실은 당사에서 책임지지 않습니다.

제품명	모델명
구입일	년 월 일
구입처	
무상보증기간	구입일로부터 1년 이내 (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨) ※배터리 보증기간은 6개월입니다

제품의 사용 도중에 이상이 발생하였을 경우에는 사용설명서를 다시 한번 확인한 후 모비프렌 고객 서비스 센터로 연락주시면 신속히 처리하여 드립니다.

서비스 센터 안내 : 전국 어디서나 지역번호 없이 1688-2251

※ 본 보증의 조건과 본 보증 하의 본사 책임은 다음과 같습니다.

- 보증은 원래 구매자에 국한됩니다.
- 영수증 사본이나 다른 구입에 대한 증명이 요구됩니다. 일련번호, 제조일 또는 제품 라벨이 제거되거나 제품에 대한 물리적인 남용, 부적절한 설치, 변경 또는 제품이 승인되지 않은 제 3자에 의해 수리되는 경우 보증은 무효화 됩니다. 제품에 대한 책임은 자사의 독자적인 재량 하에 제품의 수리나 교체에 국한됩니다.
- 배터리나 기타 액세서리 같이 정규 사용으로 마모가 되는 제한된 수명의 소모품은 특히 보증에서 제외됩니다.
- 본사는 제품의 사용이나 오용으로 인한 어떠한 사고 또는 부수적인 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 본 보증서는 구입자에게 특정 권리를 부여하며 지역에 따라 기타 권리를 부여 받을 수도 있습니다.
- 사용 설명서에 설명되지 않은 이상은, 사용자는 보증 적용 여부에 상관없이 어떤 상황에서도 본 제품에 대한 서비스, 조정 및 수리를 시도해서는 안됩니다. 그러한 작업은 구매장소, 공장 또는 승인된 서비스 대리점에 반환되어야 합니다.
- 본사는 운송이나 배달 중에 일어난 분실이나 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 본사 제품에 대한 승인되지 않은 제 3자의 수리 작업은 보증을 무효화 합니다.

## *Class B Equipment*

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION : Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## - End Product Labeling

To satisfy FCC exterior labeling requirements, the following text must be placed on the exterior of the end product.

Contains Transmitter module FCC ID: UZCMFB-HC7700

## RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines as this equipment has very low levels of RF energy.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



# MobiFren

www.mobifren.com

(주)모비프렌

A/S 관련문의 : 1688-2251

A/S 등록 : www.mobifren.com / 고객지원

경북 구미시 인동52길 88 (구평동) (주)모비프렌 서비스센터

TEL:054)474-2220 FAX:054)474-2251



R-R-GTT-MFB-HC7700

CE 1177 3.7V 200mAh

ISO 9001 품질경영시스템 인증업체



CE 1177

Design & Technology by MobiFren in KOREA  
Assembled in China